

Siltrax AS je pletené bavlněné vlákno nasycené roztokem síranu hlinitého a vysušené postupem, kterým se zachová aktivita aktivní složky. Běžná vlhkost tkání reaktivuje aktivní složku a ta rychle retrahuje gingivální tkáň bez jejího poškození, ovšem s tím, že je plně odkryt gingivální okraj.

Obsah: Každá lahev obsahuje 183 cm pleteného bavlněného vlákna. Průměrné koncentrace síranu hlinitého pro jednotlivé velikosti jsou následující:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indikace: Použijte, kdykoli je při stomatologické praxi vhodná gingivální retrakce, jako například před pořízením otisků při použití libovolné elastické otiskovací hmoty, před nasazením čepiček, korunek nebo můstků a při preparaci zubu.

Kontraindikace: Pro použití vlákna Siltrax AS nejsou známy žádné kontraindikace. Chemické složky vlákna Siltrax AS mají pro zamýšlený účel dlouhou historii bezpečnosti a účinnosti.

Varování: Pouze pro intraorální použití. Nepolykat. Uskladněte mimo dosah dětí.

Preventivní opatření:

- Seznamte se se všemi pokyny a dodržujte je.
- Pouze pro odborné použití v ordinaci.
- Pouze pro intraorální použití. Nepolykat.
- Uskladněte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte u pacientů s alergií nebo citlivostí na síran hlinitý.

Množství k použití: Použijte tolik vlákna vhodné velikosti, kolik je potřeba k obtočení krčku každého zubu, pro který se má provést retrakce, plus mírný přesah. Zub je možno obtočit dvakrát (viz níže), pokud je v brázdě dostatek místa. Retrakce při použití adrenalinového vlákna by se měla omezit na ekvivalent jednoho běžného ústního kvadrantu na návštěvu.

Pokyny k použití:

- Pro maximální účinnost vlákna Siltrax AS obtočte kus vlákna menší velikosti kolem zubu nad štěrbinou.
- Odřízněte konce tak, aby se mírně překrývaly, a smyčku pevně upěchujte do brázdíčky.
- Stejným způsobem umístěte nad vlákno menší velikosti smyčku vlákna větší velikosti.
- Až budete připraveni použít otiskovací hmotu, odstraňte pouze smyčku vlákna větší velikosti a ponechte vlákno menší velikosti na svém místě pod gingiválním okrajem, dokud nebude otisk sejmut.
- Po sejmutí otisku odstraňte i smyčku vlákna menší velikosti.
- Je také možná alternativa s použitím jediné smyčky vlákna.
- Siltrax AS do pěti až osmi minut zcela retrahuje tkáň a poté je ho třeba z úst odstranit.

Odebrané kusy vláken jsou určeny pro jediné použití a je potřeba je ihned po použití zlikvidovat. Opakované použití dávky zvyšuje u pacienta riziko zranění nebo infekce.

Bezpečnostní list produktu najdete na webu společnosti na adrese pascaldental.com nebo můžete společnost Pascal kontaktovat přímo.