

Siltrax AS to pleciony bawełniany sznurek nasycony roztworem siarczanu glinu i suszony techniką, która zachowuje działanie składnika aktywnego. Normalna wilgotność tkanek reaktywuje składnik aktywny, który szybko wycofuje tkankę dziąsła w sposób, który nie powoduje jej uszkodzenia, a jednocześnie w pełni ekspozuje brzeg dziąseł.

Skład: Każda buteleczka zawiera 183 cm plecionej bawełnianej nici. Średnie stężenie siarczanu glinu na każdy rozmiar wynosi:

| | |
|-----------------|-------------|
| Siltrax AS 7/00 | 0.12 mg/cm |
| Siltrax AS 8/0 | 0.189 mg/cm |
| Siltrax AS 9/1 | 0.335 mg/cm |
| Siltrax AS 10/2 | 0.57 mg/cm |

Wskazania: Stosować w praktyce stomatologicznej przy zaleceniach retrakcji dziąseł przed pobraniem wycisku dentystycznego jakimkolwiek materiałem elastycznym do wycisku; lub przed umieszczeniem tymczasowych koron, stałych koron, mostków; oraz w czasie opracowywania zęba.

Przeciwwskazania: Nie wiadomo o żadnych przeciwwskazaniach stosowania leku Siltrax AS. Składniki chemiczne leku Siltrax od dawna słyną z bezpieczeństwa i skuteczności w przeznaczonych celach.

Ostrzeżenia: Tylko do stosowania zewnętrznego, wewnątrz jamy ustnej. Nie połykać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności:

- Przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji.
- Tylko do profesjonalnego użytku w gabinetach stomatologicznych.
- Tylko do stosowania zewnętrznego, wewnątrz jamy ustnej. Nie połykać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować u pacjentów uczulonych lub wrażliwych na siarczan glinu.

Ilość stosowania: Stosować taką ilość nici odpowiedniego rozmiaru jaka potrzebna jest do owinięcia wokół szyjki każdego zęba który ma być odchyłony, z lekkim nałożeniem się na siebie. Dwie pętli można upakować wokół każdego zęba (patrz niżej), o ile pozwala na to przestrzeń kieszeni. Retrakcja nicią adrenaliny powinna być ograniczona do odpowiednika jednego normalnego kwadrantu ust na jedną wizytę.

Wskazówki stosowania:

- Aby zastosować lek Siltrax AS jak najskuteczniej należy okrócić pasmo mniejszej nici wokół zęba i nad bruzdą dziąsłową .
- Przyciąć końce nici na tyle żeby nałożyły się na siebie, i upakować mocno pętlę w kieszonkę dziąsła.
- Upakować drugą pętlę większej nici nad mniejszą w ten sam sposób.
- Gdy gotowe do założenia materiału wyciskowego, usunąć tylko większą pętlę nici, zostawić mniejszą pętlę na miejscu pod brzegiem dziąsła aż do zakończenia zabiegu.
- Po zakończeniu wycisku dentystycznego usunąć również mniejszą nić.
- Na przemian, pojedyncza pętla nici wystarczy.
- Lek Siltrax AS odchyła tkankę całkowicie w ciągu pięciu do ośmiu minut i po tym czasie powinien być usunięty z ust.

Użyte części nici przeznaczone są tylko do jednorazowego użytku i powinny być wyrzucone natychmiast po zabiegu. Ponowne użycie pobranej porcji naraża pacjentów na zwiększone ryzyko urazu lub infekcji.

W celu uzyskania informacji na temat produktu SDS prosimy udać się na stronę internetową pod adres pascaldental.com, lub skontaktować się bezpośrednio z firmą Pascal.